



neoform[®] MED FF



Détergent désinfectant pour les surfaces



Concentré liquide

Domaines d'application:

- Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux et des surfaces dans les hôpitaux, cabinets médicaux et maisons de retraite.
- Bactéricide, levurocide, tuberculocide, virucide et actif contre le Clostridium difficile.

Propriétés:

- Large spectre d'efficacité
- Adapté pour la désinfection de l'environnement des patients lors d'irruption de C. difficile.
- Efficace contre les norovirus selon les recommandations du RKI (ministère de la santé allemand).
- Très bonne efficacité détergente.

Utilisation et dosage:

neoform MED FF est utilisé pour l'action combinée de nettoyage et de désinfection à température ambiante par la méthode d'essuyage humide.

Diluer le neoform MED FF selon les recommandations ci-après en fonction de l'efficacité souhaitée.

Recouvrir / essuyer les surfaces à nettoyer et à désinfecter avec la solution diluée et respecter les temps de contact indiqués.

	Conditions de propreté (surfaces prélavées) 20 °C	Conditions de saleté (surfaces non prélavées) 20 °C
Bactéricide, levurocide ¹	1,0%, 5 min 0,5%, 15 min 0,5%, 30 min 0,25%, 60 min	1,5%, 5 min 1,0%, 15 min 0,5%, 30 min 0,25%, 60 min
tuberculocide ¹	4,0 %, 30 min 1,0 %, 60 min	4,0 %, 30 min 1,0 %, 60 min
Partiellement virucide (dont HIV, HBV, HCV) ²	0,5 %, 5 min	
Virucide ²	2,0 %, 60 min	
Efficacité contre Clostridium difficile ³	3,0 %, 30 min	

Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des aides au dosage (n'hésitez pas à nous contacter).
- Il est recommandé de porter des gants en manipulant les produits de désinfection.
- Pour éviter les dépôts sur les surfaces après le nettoyage et la désinfection, rincer à l'eau potable.
- Le traitement du matériel doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Utiliser les désinfectants avec précaution. Bien lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.



Expertises:

Les expertises désinfectantes sont disponibles sur demande.

Données techniques:

Valeur pH	env. 4,5 (concentré, 20 °C)
Viscosité	< 10 mPas
Poids spécifique	1,0 g/cm ³ (20 °C)

Composants:

Selon le règlement européen 648/2004 relatif aux détergents:

< 5 % tensioactifs non ioniques

Parfum: (Benzylbenzoat, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde)

Substances désinfectantes dans 100 g:

5,0 g chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium

3,0 g chlorure de didecyldiméthylammonium


8,0 g Glutaraldéhyde (Glutaral)

Marquage CE: 0297

neoform MED FF est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE Annexe I.

Stockage:

Conserver à température entre 0 et 25 °C .
Conserver les récipients bien fermés.

4 ans dans les conditions de stockage indiquées.
Utilisable jusque : Voir date indiquée sur l'étiquette, après le symbole .

1 Selon la méthode de la société allemande pour l'hygiène et la microbiologie (DGHM)

2 Selon la méthode de l'institut Robert-Koch (RKI), et de l'association allemande pour la Lutte contre les virus (DVV)

3 Selon la norme EN 13704

Indications de risques et consignes de sécurité:

Classement et étiquetage selon les critères de la directive européenne 99/45/CE.

Symbole de danger: C - corrosif, Xn - nocif

Contient: Glutaraldéhyde, chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium

Indications de risques:

R 10 - Inflammable.

R 20/22 - Nocif en cas de respiration ou d'ingestion.

R 34 - Provoque des brûlures.

R 42/43 - Sensibilisation possible par la respiration ou le contact avec la peau

Consignes de sécurité:

S 23 - Ne pas respirer les vapeurs / l'aérosol.

S 26/27/28 - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas de contact avec la peau enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau.

S 36/37/39 - Au travail, porter l'équipement de protection adapté (vêtements, gants, lunettes de protection ou masques).

S 45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer cette fiche technique)

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.fr - Rubrique "service".

Conditionnement	Contenu
Bidon	5 L

FT 4057/3-1
04/2010

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.